


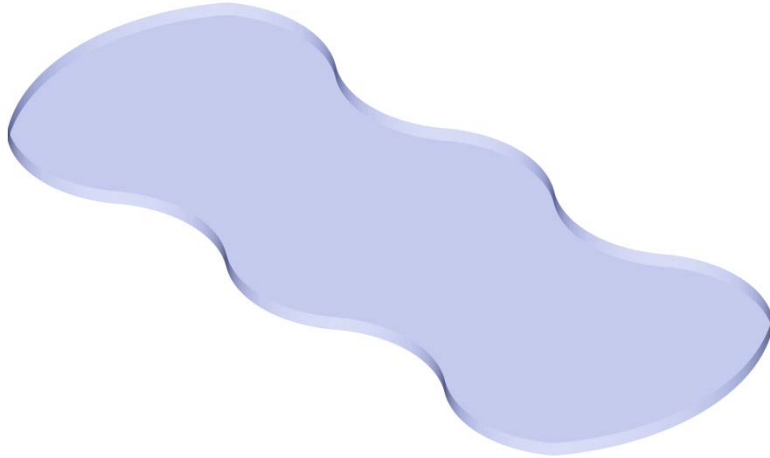

Clave B015600.



Etiqueta Demo Silex® 05 esp.

Descripción en idioma español de clave, dimensiones, contenido, condiciones, lote, caducidad y registros legales del producto.



et silex 181204

Clave: **B015600** Dimensiones: **7 X 17 cm.**


Presentación: **Sobre con un dispositivo adhesivo de silicona en condición estéril, útil para disminuir la tensión, después de retirar los puntos de sutura quirúrgica, mejorando el aspecto estético de la cicatriz final.**

Lote: **B015600191104-01** Caducidad: **191109**

Registros: **SSA 1409C90**

**Biodiseño S.A. México D.F. telfax (01 55) 5564 2424.
www.biodiseño.com.mx**

Componentes del producto.

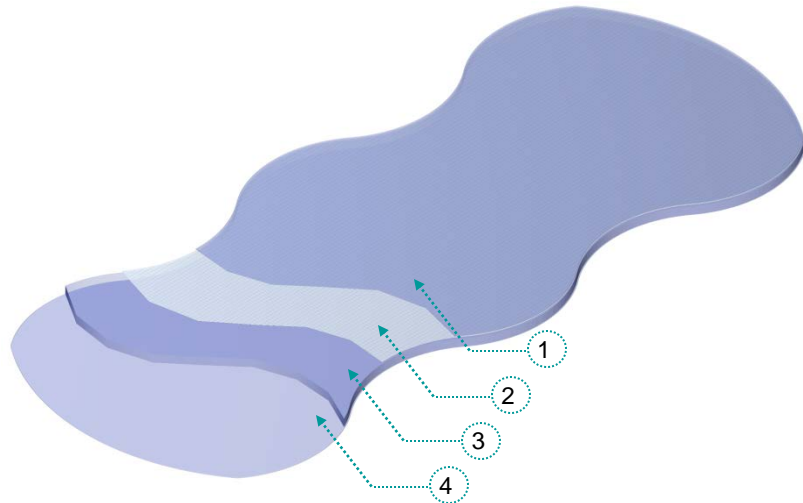


1. Cubierta antiadherente y permeable
2. Malla estabilizadora
3. Adhesivo de gel de silicona
4. Cubierta desprendible, lado aplicable.

Presentación

- a) Empaque primario para protección externa
- b) Sobre de polietileno de baja densidad con una pieza en condición estéril (oxido de etileno).



Silex®

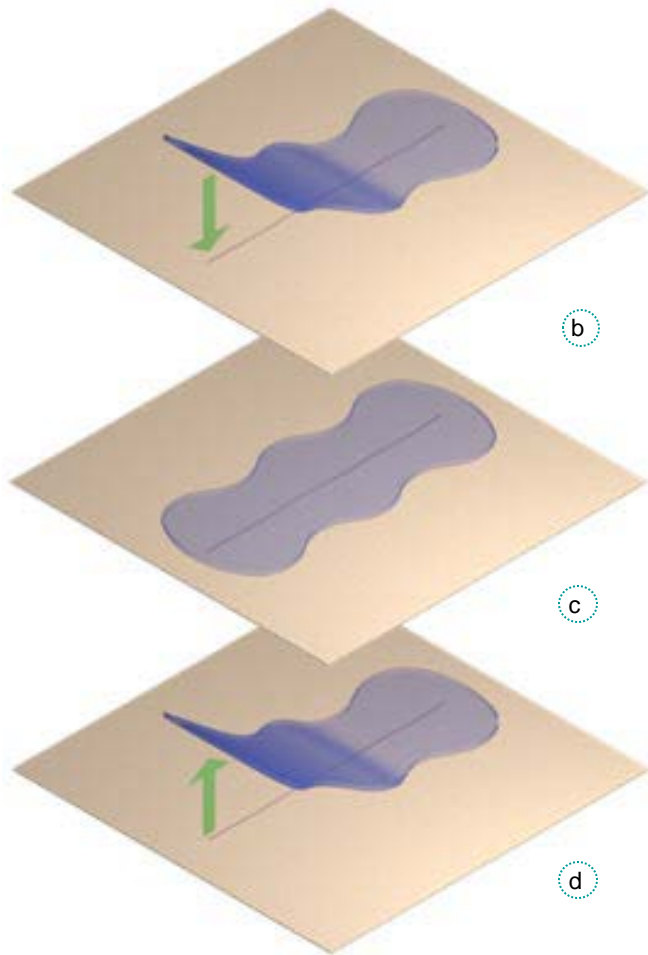

Indicaciones para el usuario.

- Para iniciar la colocación del Silex, es necesario retirar la cubierta de polietileno de alta densidad, que protege al adhesivo de gel de silicona (lado aplicable).
- Aplicar el Silex sobre la herida quirúrgica, tomando en cuenta el retiro previo de los puntos de sutura.
- La permanencia diaria del Silex dependerá de la indicación médica (en promedio se utiliza durante 24 horas, llegando a ser necesaria su permanencia durante 2 a 6 meses) solo se debe retirar para efectuar la limpieza de la herida o el baño diario.
- Para realizar el mantenimiento de la herida quirúrgica, deberá desprenderse el Silex por uno de los extremos de menor dimensión, colocando su parte adhesiva hacia arriba.

Mantenimiento del producto.

- Lavar la superficie adhesiva con agua y jabón quirúrgico (Surgeon*).
- Enjuagar únicamente con agua hervida a temperatura ambiente.
- Retirar el exceso de agua, por medio de aire caliente (secadora de pelo).
- Reaplicar el Silex siguiendo los pasos b y c

